

Disnemar®

Izotoniczny donosowy roztwór soli mineralnych

Co to jest Disnemar?

Disnemar jest izotonicznym roztworem soli mineralnych o neutralnym pH, który może być stosowany w obrębie jamy nosowej, bez podrażniania błony śluzowej nosa. Specjalnie zaprojektowany aplikator wyrobu umożliwia jego podawanie w każdej pozycji (również w pozycji leżącej). Niewielkie, wygodne do przenoszenia opakowanie pozwala na stosowanie roztworu w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu.

Przezroczysta butelka umożliwia stałą kontrolę ilości roztworu.

Disnemar jest zalecany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku od 12 lat.

W jakim celu stosuje się Disnemar?

Disnemar jest wskazany do utrzymywania codziennej higieny nosa i prawidłowego stanu błony śluzowej nosa. Fizjologiczny roztwór soli mineralnych o neutralnym pH oczyszcza oraz zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia błony śluzowej nosa i wspomaga jej regenerację.

Dzięki mechanicznemu działaniu wypłukującemu łagodzi objawy niedrożności nosa.

Disnemar posiada specjalny aplikator – nebulizator mikrodyfuzyjny, który zapewnia aplikację roztworu w postaci delikatnej mgiełki. Dzięki temu można osiągnąć optymalne nawilżenie błony śluzowej nosa bez dyskomfortu.

Wskazania:

Disnemar zalecany jest szczególnie:

- do codziennej higieny nosa do nawilżania wysuszonej błony śluzowej nosa spowodowanej różnymi przyczynami np. działaniem klimatyzacji, centralnego ogrzewania, dymem papierosowym, kurzem, nawracającymi infekcjami błony śluzowej nosa, podeszłym wiekiem
- do udrożnienia nosa przy niedrożności nosa spowodowanej:
 - stanami kataralnymi i alergicznymi takimi jak: przeziębienie, nieżyt nosa czy ostre/przewlekłe zapalenie zatok
 - zanieczyszczonym powietrzem (np. duże zapylenie)

Co należy wiedzieć zanim zastosuje się Disnemar?

Wyrób można stosować:

- w profilaktyce i wspomagająco w trakcie leczenia
- w okresie ciąży i karmienia piersią
- w każdym wieku
- codziennie, kilka razy w ciągu dnia - przez dowolnie długi czas

Disnemar zawiera

- wodę oczyszczoną o neutralnym pH
- elektrolity - tzn. jony sodu, potasu, chloru, wodorowęglany
- środek konserwujący - chlorek benzalkonium, który zapobiega rozwojowi bakterii w roztworze

Opakowanie wyrobu **Disnemar** zawiera 25 ml izotonicznego roztworu wodnego o neutralnym pH i jest zaopatrzone w specjalny aplikator (nebulizator mikrodyfuzyjny), który każdorazowo rozpyla tę samą ilość roztworu. Dzięki temu nie ma niebezpieczeństwa jednorazowego podania zbyt dużej ilości płynu.

Z jednego opakowania otrzymuje się aż do 250 dawek.


Disnemar posiada aplikator, który umożliwia równomierne rozprządzenie wyrobu na powierzchni błony śluzowej nosa.

Jak i kiedy stosować Disnemar?

Dorośli i dzieci wieku powyżej 12 lat: jedna do dwóch dawek do każdego otworu nosowego kilka razy na dobę. Jeśli to konieczne **Disnemar** może być stosowany przez dłuższy czas bez żadnego ryzyka lub przeciwwskazań.

Sposób użycia

Przed podaniem wyrobu **Disnemar** po raz pierwszy należy nacisnąć aplikator 1–3 razy, aby aktywować pompkę dozującą i uzyskać odpowiednie rozpylenie roztworu. Po dłuższym okresie nieużywania może zaistnieć konieczność powtórzenia wyżej opisanej czynności. Nie zaleca się zdejmowania aplikatora po użyciu. Jeżeli zachodzi konieczność oczyszczenia go, należy użyć ręcznika lub chusteczki. Specjalna budowa zaworu pompki zapobiega cofaniu się roztworu dzięki czemu pozostaje czysty przez cały okres ważności wyrobu.

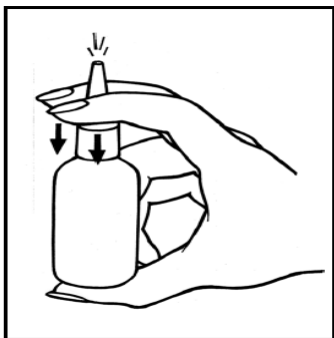

Naciskanie aplikatora

UWAGA

Disnemar należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie należy stosować wyrobu po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu.

Wytwórca

MEDA Pharma S.p.A.
Via Valosa di Sopra, 9
20900 Monza
Włochy

Dystrybutor

Mylan EPD Sp. z o.o.
ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa

Data sporządzenia ulotki: 06/2018

CE